

Avec Aqualarm® U.P. intensive, vous avez choisi un produit qui humidifie, rafraîchit agréablement, apaise vos yeux et procure un soulagement durable des symptômes typiques causés par le trouble de l'humidification. Dans son Récipient MultiDose innovant et exempt d'agents conservateurs, possédant un mécanisme de pompe breveté, Aqualarm® U.P. intensive répond aux exigences des solutions d'humidification modernes.



- ✓ Aqualarm® U.P.intensive est exempt d'agents conservateurs
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive se conserve 12 semaines (3 mois) après ouverture
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive contient de l'acide hyaluronique, polymère naturel également présent dans les structures de l'œil humain et dans le film lacrymal naturel
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive est par conséquent très bien toléré
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive peut être utilisé à long terme
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive convient pour l'humidification rémanente des lentilles de contact souples aussi bien que des lentilles de contact dures et améliore sensiblement le confort du port de lentilles de contact durant toute la journée
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive s'utilise facilement et de façon sécurisée
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive permet le dosage précis d'une seule goutte

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, il contient des informations importantes pour l'utilisation de ce produit.

Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à votre pharmacien, votre médecin ou à nous tout simplement.

Quels conditionnements sont disponibles ?

Aqualarm® U.P. intensive est disponible en flacon de 10 ml.

La solution contient de l'acide hyaluronique à 0,24% et des excipients et est dépourvue d'agent conservateur.

Quand devez-vous utiliser Aqualarm® U.P. intensive ?

Lors de troubles de l'humidification de la surface de l'œil, provoquant des symptômes tels qu'une sensation de sécheresse de l'œil, une brûlure ou une fatigue oculaire.

Ces symptômes sont souvent dus au travail sur écran ou au fait de regarder la télévision pendant une période prolongée, à l'air ambiant sec, au chauffage, à la climatisation, à la fumée de cigarettes ou aux courants d'air. De même, les agents conservateurs de certains collyres, certaines affections, la prise de certains médicaments (comme par exemple la pilule contraceptive) peuvent jouer un rôle important dans l'apparition des troubles de l'humidification.



Aqualarm® U.P. intensive améliore l'humidification de la surface de l'œil et l'humidification rémanente durant le port de lentilles de contact souples et dures. Il rafraîchit et apaise notablement les yeux.

Combien de fois devez-vous utiliser Aqualarm® U.P. intensive ?

Selon vos besoins, instillez 1 goutte d' Aqualarm® U.P. intensive dans le cul de sac conjonctival. Etant donné qu' Aqualarm® U.P. intensive est exempt d'agents conservateurs, vous pouvez l'utiliser quotidiennement aussi fréquemment que souhaité, il est également bien toléré en cas d'utilisation permanente.



Vous utilisez Aqualarm® U.P. intensive de la façon suivante :

Aqualarm® U.P. intensive dispose d'un mécanisme breveté de pompe permettant de ne pas inclure d'agent conservateur à la solution de gouttes et le support pouce ergonomique en simplifie l'usage.



1. Otez le capuchon protecteur sur le haut du flacon avant chaque usage. Assurez-vous que vos doigts n'entrent pas en contact avec l'extrémité du flacon.



2. Placez votre pouce sur le support pouce ergonomique et deux autres doigts sur le bas du flacon.



3. Retournez le flacon et tenez-le comme indiqué. Avant la première utilisation du produit, vous devez l'amorcer en appuyant sur le support pouce environ 7 fois jusqu'à l'apparition de la première goutte.



4. Pour appliquer le produit, inclinez légèrement votre tête en arrière et tenez le flacon au-dessus de votre œil en position verticale. Abaissez légèrement votre paupière à l'aide d'un doigt de votre main libre tout en appuyant fermement sur le support pouce avec l'autre main pour appliquer une goutte dans l'œil près de la paupière inférieure.
Assurez-vous que la goutte a bien atteint votre œil. Fermez l'œil, puis déplacez-le lentement dans un mouvement de va-et-vient pour répartir le produit de manière optimale sur toute la surface de l'œil.

5. Evitez tout contact de l'extrémité du flacon avec vos doigts ou votre œil de manière à ne pas contaminer la solution.

6. Remplacez le capuchon protecteur sur l'extrémité du flacon immédiatement après usage.

A quoi faut-il veiller lors de l'utilisation d'Aqualarm® U.P. intensive ?

Pour une meilleure tolérance, Aqualarm® U.P. intensive ne contient pas d'agents conservateurs. Grâce au mécanisme de pompe brevetée, Aqualarm® U.P. intensive est utilisable jusqu'à 12 semaines (3 mois) après la première utilisation. Veuillez ne plus utiliser Aqualarm® U.P. intensive après la date d'expiration. Dans de très rares cas, des réactions d'hypersensibilité peuvent survenir. Si cela arrive, n'utilisez plus le produit. N'utilisez pas Aqualarm® U.P. intensive si le flacon est endommagé.



Fabricant du dispositif médical :
Chauvin ankerpharm GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
D-13581 Berlin - Allemagne



Après la première utilisation, le dispositif médical se conserve 3 mois (= 12 semaines).



Désignation du lot



Stockage du dispositif médical à une température comprise entre +1 °C et +25 °C



Date d'expiration (MM-AAAA) - ne pas utiliser après la date de péremption.



Ne pas utiliser si le flacon est endommagé



®/TM signifie que ce sont des noms de marque appartenant à Bausch & Lomb Incorporated ou à l'une de ses filiales.
© Bausch & Lomb Incorporated.

BAUSCH + LOMB
Laboratoire Chauvin

Distributeur :
Laboratoire Chauvin Montpellier
416 rue Samuel Morse - 34000 MONTPELLIER - France

3461900
49714PB931/2-F
290E02-12.11