

URGO BRÛLURES BLESSURES SUPERFICIELLES PANSEMENT STÉRILE

Indications

Le pansement stérile URGO Brûlures, blessures superficielles pansement stérile est destiné au traitement des brûlures domestiques du 1^{er} degré et du 2nd degré superficiel (la phlyctène ou cloque) ainsi que des blessures superficielles (écorchures, coupures).

Avantages produit

URGO Brûlures, blessures superficielles pansement stérile associe deux substances (vaseline + carboxyméthylcellulose) au sein d'un tulle qui permet de soulager la douleur et de favoriser la cicatrisation de la plaie. Grâce au tulle qui compose la partie centrale, URGO Brûlures, blessures superficielles pansement stérile n'adhère pas à la plaie et permet un retrait indolore.

MODE D'EMPLOI

Dans le cas d'une brûlure du 2nd degré superficiel : maintenir au préalable la plaie sous l'eau froide pendant 15 minutes pour limiter l'extension de la brûlure.

Dans tous les cas :

Nettoyer la plaie avec un antiseptique sans alcool.

Rincer à l'eau ou au sérum physiologique URGO.

Dans le cas d'une brûlure, ne jamais utiliser d'antiseptiques colorés de type éosine.

Sécher soigneusement à l'aide d'une compresse stérile.

Dans la mesure du possible, respecter la cloque qui est un rempart contre l'infection. Si elle se perce, la désinfecter. Il est inutile d'enlever la peau morte si elle ne part pas d'elle-même.

Retirer les ailettes de protection.

Appliquer sur la zone à traiter.

L'utilisation d'une crème au préalable est inutile.

La durée habituelle du traitement est de 5 à 6 jours avec renouvellement du 1^{er} pansement au bout de 24h, puis toutes les 48h.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas de brûlure du 2nd degré profond, du 3^{ème} degré, ou en cas de brûlure sur le visage. Dans ces cas, une consultation médicale préalable est obligatoire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Réservé au traitement des plaies localisées, dont la taille ne dépasse pas le format d'une compresse. Sur les brûlures étendues, il est souhaitable que la compresse déborde largement pour permettre l'absorption des exsudats. Si vous ne constatez aucune amélioration de la cicatrisation au bout de 6 jours, consultez votre médecin. Pour toute brûlure chez l'enfant, demandez conseil à votre pharmacien. En présence de signes cliniques d'infection locale (rougeurs s'étendant à la peau non lésée, douleurs..), consultez votre pharmacien ou votre médecin. Le pansement URGO Brûlures et blessures superficielles doit être utilisé dès ouverture du sachet, stocker à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.

MISE EN GARDE :

La réutilisation d'un produit à usage unique peut provoquer des risques d'infection.

COMPOSITION :

Support non tissé extensible de couleur chair avec en son centre une trame polyester imprégnée de particules d'hydrocolloïde (carboxymethylcellulose) et de vaseline.

FORMATS :

Sachet unitaire stérile.

Boîte contenant 6 pansements pour le petit format ou 4 pansements pour le grand format.

Ces produits sont des dispositifs médicaux. Pour plus d'information demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien et consultez la notice avant utilisation.