

3M™ Coheban™

Bande élastique de contention et de maintien

Composition

Support composé de :

- fibres de rayonne non tissées
- fibres longitudinales en spandex (4 fibres/cm) et recouvert d'une substance cohésive à base de caoutchouc naturel (latex).

Caractéristiques

de la bande de contention 3M Coheban

- **Cohésive :**
elle adhère sur elle-même tout en respectant la peau, même fragilisée.
- **Confortable :** légère - le tiers de l'épaisseur et la moitié du poids d'une bande élastique ordinaire -, la bande Coheban de part sa structure poreuse et son absence d'adhésif, permet la « respiration » de la zone recouverte et évite la macération. L'ablation de la bande est indolore et atraumatique.
- **Facile et rapide à poser :**
elle ne glisse, ni ne se défait lorsqu'elle est mise en place sur des patients alités ou des sportifs.
- **Elasticité modulable, régulière et constante dans le temps :**
l'auto-adhérence et l'élasticité de la bande permettent d'obtenir tout effet de compression souhaité. La pression obtenue est régulière et constante.
- **Hydrophobe :**
elle garde ses propriétés au contact de l'eau et permet ainsi de prendre des douches et de conserver une bonne hygiène.
- **Transparente aux rayons X :**
il n'est pas nécessaire d'oter le bandage lors d'une radiographie.
- **Réutilisable**

Conservation et durée de vie

Ce produit doit être conservé à température ambiante (15-30°C). Pour en garantir la qualité, le conserver dans son emballage individuel jusqu'à utilisation (date de péremption imprimée sur l'emballage).

Indications

- **Traumatologie sportive et générale**
 - Contentions articulaires (entorses bénignes de la cheville et du poignet . . .)
 - Prévention des récurrences après traumatismes
 - Lésions musculo-tendineuses (élongation, contusion, claquage . . .)
 - Participe à la résorption de l'œdème et de l'hématome
 - Maintien de compresses sur une plaie suturée ou non (plaies des doigts, de la tête, des membres . . .)
 - Maintien d'attelles, de pansements compressifs et de poches de cryothérapie (ex : 3M™ ColdHot™).
- **Phlébologie**
 - Insuffisance veineuse aiguë (œdème, hypodermite, ulcère, syndrome post-phlébitique, lymphœdème, varices . . .)
 - Contention après sclérose et stripping
 - Lutte contre l'œdème de stase.
- **Maintien de pansements**
 - Plaies des extrémités,
 - Brûlures,
 - Plaies de la tête, épaules, talons, . . .
 - Maintien en cryothérapie.

Présentation

- Blanc, chair : 7 cm x 3 m et 10 cm x 3,50 m (non étirée)
- Rouge, bleu, vert : 7 cm x 3 m (non étirée)


Remboursement

Incrit sur la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité Sociale.





Entorses bénignes de la cheville

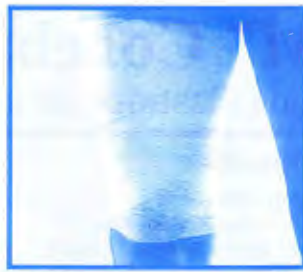

Contusions et déchirures musculaires



Tendinites du coude et du poignet



Plaies de la tête

Conseils d'utilisation

- 1) Dérouler environ 20 cm de bande avant application.
- 2) Relâcher la tension de la bande, le gaufrage doit toujours rester apparent pour une application en circulaire.
- 3) Poser le 1er tour de bande sans trop serrer. Puis poursuivre le bandage sans tension excessive en recouvrant à chaque spire les 2/3 de la spire précédente.
- 4) Terminer l'application et exercer une légère pression de la main sur le bandage pour assurer une meilleure tenue.

Pour tout conseil, consulter votre pharmacien ou votre médecin

3M

Laboratoires 3M Santé

Boulevard de l'Oise
95029 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 85 85

Précautions d'emploi

- 1) Si vous ressentez des fourmillements ou observez un gonflement ou une décoloration de l'extrémité du membre, votre bandage est trop serré. Il convient de le détendre : enlever la bande et la replacer en exerçant une tension plus légère.
- 2) Ne pas poser directement sur une plaie ouverte
- 3) Ce produit contient du latex naturel qui peut provoquer des réactions de type allergique chez certains individus.

Pour toutes informations complémentaires sur nos produits visitez notre site www.3m.com/fr



3M 2002
3M, Coheban sont des marques commerciales de la société 3M

DV-2063-0004-3