

# ReNu® MPS™ Solution Multifonctions de BAUSCH & LOMB

Cette notice contient des informations importantes sur les instructions d'usage et les recommandations d'utilisation importantes. Lire avec attention et conserver cette notice.

ReNu® MPS™ Solution Multifonctions est une solution tout-en-un qui nettoie, rince et décontamine en même temps.

ReNu® MPS™ Solution Multifonctions est une solution sûre et efficace pour les lentilles de contact souples.

ReNu® MPS™ Solution Multifonctions est une solution stérile qui contient de la poloxamine et du DYMED® pour des lentilles saines et confortables.

## COMPOSITION:

Solution stérile contenant de l'acide borique, edetate de sodium, borate de sodium, chlorure de sodium;

DYMED® (polyaminopropyl biguanide) 0.00005% p/v,  
poloxamine 1% p/v.

SANS CHLORHEXIDINE NI THIMEROSAL.

**MODE D'EMPLOI :** Toujours se laver et s'essuyer les mains avant de manipuler les lentilles de contact. Les lentilles de contact doivent être soigneusement nettoyées, rincées et immergées dans la solution à chaque fois que vous les retirez pour favoriser la décontamination.

Afin de nettoyer et décontaminer soigneusement vos lentilles de contact, il est impératif de suivre ces étapes à chaque fois que vous retirez vos lentilles.

**Etape 1:** Mettez la lentille dans la paume de la main et versez au moins 3 gouttes de solution ReNu Multifonctions sur chaque côté de la lentille. Massez la lentille avec l'index pendant environ 20 secondes. Aucune autre solution de nettoyage n'est requise.

**Etape 2:** Rincez abondamment la lentille avec la solution ReNu Multifonctions.

**Etape 3:** Mettez vos lentilles propres dans l'étui et remplissez de solution ReNu Multifonctions. Laissez tremper au minimum 4 heures ou toute la nuit. Conservez vos lentilles dans l'étui fermé, jusqu'au moment de les remettre, au maximum 30 jours. Retirez vos lentilles de l'étui et placez-les sur vos yeux. Après avoir posé vos lentilles sur l'œil, videz l'étui et rincez-le avec de la solution ReNu® MPS™ Multifonctions neuve. Laissez sécher à l'air libre.

**Lubrification:** Si une irritation mineure ou un inconfort apparaît pendant le port de vos lentilles, mettez une goutte de ReNu Multifonctions directement dans l'œil et clignez de l'œil deux ou trois fois.

## Nettoyage hebdomadaire:

Pour certains porteurs de lentilles, une déprotéinisation hebdomadaire peut s'avérer nécessaire.

Consultez votre spécialiste.

## Précautions d'emploi:

- Vous devez suivre les conseils et recommandations donnés par votre spécialiste. Ne pas suivre ces conseils peut engendrer le développement d'infections oculaires sévères.
- Après chaque utilisation, jeter la solution ReNu® MPS™ Multifonctions restant dans l'étui.
- Ne pas mettre l'embout du flacon en contact direct avec l'œil ou n'importe quelle surface, pour cause de risques d'infections.
- Garder le bouchon du flacon fermé lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'éviter tout risque de contamination ou d'évaporation.
- Ne pas utiliser ReNu® MPS™ Solution Multifonctions avec une méthode de décontamination par la chaleur.
- Jeter la solution restante 6 mois après la première ouverture du flacon.
- Ne pas utiliser après la date de péremption
- Ne pas utiliser d'autres médicaments ophtalmiques en même temps que cette solution sans l'avis de votre spécialiste.
- GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

## Important

Si une irritation apparaît, persiste ou augmente, arrêtez le port de vos lentilles et consultez votre spécialiste.


## EN DEHORS DE CHEZ SOI

En dehors de chez soi, il est recommandé d'utiliser « ReNu Flight Pack » ou ReNu 60ml, qui sont composés de la solution BAUSCH & LOMB ReNu® MPS™ Solution Multifonctions et de son étui.

La solution BAUSCH & LOMB ReNu® MPS™ Solution Multifonctions est disponible en flacons de 60ml, 2x60ml Flight Pack, 120ml, 240ml, 360ml, 500ml ainsi qu'en Pack Economique 2x360ml ou 3x360ml.

 Bausch & Lomb Incorporated  
Rochester NY 14609 USA



 Bausch & Lomb Incorporated  
106 London Road, Kingston-upon-Thames KT2 6TN,  
UK

Fabriqué en Italie

 0050

Bausch & Lomb, ReNu Multifonctions et DYMED sont des marques déposées de Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated

154083378-02