

Avec le gel lubrifiant **Durex Play™ Sensitive***, découvrez enfin le secret pour vivre des plaisirs intensément doux à deux. Goûtez à cette sensualité et cette volupté... vous ne pourrez plus vous en passer! Sa formulation ultra douce prend soin de vous : avec un pH équilibré, ce gel est inodore, incolore et non gras, pour une parfaite tolérance. Il ne contient pas de paraben. Ce gel lubrifiant peut être utilisé pour pallier les problèmes de sécheresse vaginale et d'inconfort, et créer une sensation sensuelle entre vous et votre partenaire.

Conseils d'utilisation :
Pour ouvrir, retirez le capuchon et tournez la pompe. D'une simple pression sur la pompe doseuse, recueillez une dose de gel sur vos doigts et appliquez-la sur vos zones érogènes. Vous pouvez renouveler l'application autant de fois que vous le désirez. Le gel lubrifiant **Durex Play™ Sensitive*** est idéal en complément des préservatifs Durex et peut être appliqué sur le préservatif déjà mis en place. Ce gel n'est pas un contraceptif et ne contient pas de spermicide. Vous pouvez facilement le rincer à l'eau. Ce gel ne tache pas et ne colle pas.

Le lubrifiant **Durex Play™ Sensitive*** convient à un usage vaginal, anal ou oral. Evitez le contact avec les yeux. En cas d'irritation, arrêtez l'utilisation. Si l'irritation persiste ou si l'utilisation d'un gel lubrifiant est nécessaire systématiquement, consultez votre médecin. A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. A utiliser dans les 3 mois après ouverture. Bien que ce gel soit comestible, il ne s'agit pas d'un produit alimentaire. Tenir hors de portée des enfants. Cet emballage sert de notice, conservez-le pour toute éventuelle consultation future.

Variez les plaisirs et découvrez toute la gamme Play sur www.durex.fr



COMPATIBLE AVEC LES

PRESERVATIFS

SSL Healthcare France S.A.S

23 allées de l'Europe

92244 St. Denis Cedex

01 47 34 10 00

www.durex.fr