

**Votre vie quotidienne, vos activités sportives sont parfois à l'origine de douleurs musculaires.  
Vous recherchez un produit efficace et confortable  
qui vous procure un soulagement longue durée à tout moment de la journée.**

#### LA SOLUTION SYNTHOLKINÉ

**Connaissez-vous la thermothérapie ?** Pour soulager les douleurs musculaires, la chaleur (la thermothérapie) est une solution efficace et naturelle utilisée régulièrement par les kinésithérapeutes. SYNTHOLKINÉ utilise ce principe pour son patch chauffant. **Pendant près de 8h**, il diffuse en profondeur une chaleur thérapeutique qui permet de soulager efficacement les **DOULEURS MUSCULAIRES DORSALES**. Confortable et souple, le patch chauffant SYNTHOLKINÉ a été conçu pour épouser parfaitement les formes du corps, comme sur des zones étendues (bas du dos, épaules, nuque...) et suivre vos mouvements. De plus il est facile à appliquer et à retirer. **Discret et sans odeur**, vous vous sentez soulagé tout en restant actif.

#### COMMENT AGIT-IL ?

Le patch chauffant SYNTHOLKINÉ contient des **agents calorifiques** (fer, charbon activé, eau...) qui produisent de la chaleur au contact de l'air. La diffusion de la chaleur va augmenter le flux sanguin, améliorer l'apport en oxygène et en nutriments essentiels et faciliter l'élimination des toxines.

#### LE RÉSULTAT ?

**Cette chaleur thérapeutique se diffuse en continu pendant près de 8h** pour soulager vos crampes, décontracter vos muscles tendus et vos courbatures. Vous vous sentez apaisé, détendu.

**Attention : lire attentivement les instructions d'utilisation sur le sachet avant toute utilisation.**

#### COMMENT UTILISER LE PATCH CHAUFFANT SYNTHOLKINÉ ?

Retirer le film protecteur du patch et appliquer la face adhésive directement sur une peau propre et sèche, au niveau de la zone douloureuse (bas du dos, épaules, nuque...) en appuyant fermement. Il n'est pas nécessaire de secouer le patch.

**N'ouvrir le sachet qu'au moment de l'application.**

#### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER LE PATCH SYNTHOLKINÉ ?

- Si vous avez déjà eu une réaction allergique à un patch chauffant.
- Sur une zone où la chaleur ne peut pas être ressentie ou sur une peau abîmée.
- Chez les enfants de moins de 12 ans ou chez les personnes ne pouvant pas retirer elles-mêmes le patch.
- Sur des bleus ou des bosses dans les 48 h suivant la blessure.

#### QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE ?

Demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous avez plus de 65 ans ou dans les cas suivants :

- Mauvaise circulation sanguine (exemple : insuffisance cardiaque)
- Grossesse
- Problèmes nerveux (exemple : perte de sensibilité due au diabète)
- Polyarthrite rhumatoïde
- Affections cutanées comme eczéma, psoriasis ou peau très fragile ou sensible.

Usage unique.

**Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.**

A conserver à une température inférieure à 25°C.

**⚠️ احتياطات الاستعمال:** استشر الطبيب قبل استعمال هذا المستحضر إذا كان سنك أكثر من 65 سنة أو في الحالات التالية:  
- ضعف الدورة الدموية (قصور في القلب مثلاً)  
- الحمل  
- اختلال عصبي (فقدان الحساسية الناتج عن مرض السكري مثلاً)  
- التهاب المفاصل الروماتويدي  
- الأمراض الجلدية مثل الأكزيما، الصدفية و البشرة الجدهشة والحساسة  
استعمال وحيد. يحفظ بعيداً عن مראى و متناول الأطفال تحت درجة حرارة أدنى من 25°م

**⚠️ كيفية الاستعمال:** نزع الغلاف الواقي للقطعة تطبيق الجانب اللاصق بالضغط جيداً، مباشرة على بشرة نظيفة و جافة في المنطقة المؤلمة (أسفل الظهر، الكتف، الرقبة...).

ليس من الضروري هز القطعة المسخنة. عدم الفتح إلا عند الاستعمال.  
**⚠️ حالات عدم الاستعمال:**  
- سوابق حساسية لتقطع مسخنة  
- على المناطق التي لا يمكن فيها الإحساس بالحرارة أو البشرة التالفة  
- عند الأطفال الأقل من 12 سنة أو الأشخاص الذين لا يمكنهم نزع القطعة بمفردهم  
- فوق الورم خلال الـ 48 ساعة الموالية للصدمة

**⚠️ سانتول كيني**  
آلام العضلات  
8 ساعات من الحرارة العلاجية  
يخفف الألم بسرعة  
يريح الأم العضلات الظهرية  
أعلى و أسفل الظهر  
قطعتين مسخنتين ذاتيّتا اللصق



SmithKline Beecham Ltd, EUCH CQ, 11 Stoke Poges Lane, Slough, Berks, SL1 3NW, UK

الصانع: سميتكلاين بيشام ليتد، EUCH QC، 11 ستوك بوجز لين، سلوغ، بيركس، SL1 3 NW المملكة المتحدة



GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline Santé Grand Public BP 23 - 78164 Marly-le-Roi Cedex

جلاكوسميثكلاين سانتيه للعامة، ص.ب 23- 78164 مارلي لو روا سينكس - فرنسا

CE 0120